

## БЕРЕГИТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

ОРИГИНАЛ



стерильная упаковка

мембрана защищает от попадания жидкости в моторную часть ручки

узкий канал вокруг иглы

высокое качество заточки кончика иглы с текстурированной поверхностью иглы

Сделано в Германии в соответствии с ISO 9001/13485

пластик медицинского класса

нет доказательств стерильности

нет защиты от перекрестного загрязнения

**РИСК:** ВИЧ, гепатит и т.д.  
**РИСК:** попадание жидкости в двигатель ручки

широкий канал вокруг иглы

**РИСК:** разбрызгивание пигмента, не экономичный расход

низкое качество заточки кончика иглы с гладкой и ровной поверхностью


**РИСК:** БОЛЬШЕ боли, БОЛЬШЕ отека, БОЛЬШЕ кровотечения

**РИСК:** меньше остаток пигмента в коже

Сделано в Китае

дешевый пластиковый материал

ПОДДЕЛКА

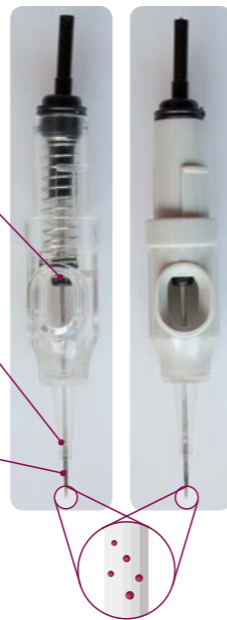












## КОНФИГУРАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ

MyStyle

natural permanent make up

[www.mystyle.ru](http://www.mystyle.ru)

Тип модуля	Диаметр иглы	Symphony II Symphony III	PLM Master	TOP Master Advanced PRO	Брови	Веки	Губы	Особенности работы
 NANO n1	0,2	✓	✓	✓	Волосковая техника NANO BROW	Не применяется	Технологии напыления	Экстратонкие волоски, коррекция волосковой техники.
 NANO n2	0,25	✓	✓	✓	Волосковая техника NANO BROW	Не применяется	Технологии напыления	Естественные тончайшие волоски, максимум четкости.
 NANO NT	0,25 in Tube		✓		Волосковая техника NANO BROW	Не применяется	Технологии напыления	Прорисовка ювелирно-тонких волосков с особой точностью.
 1-liner	0,4	✓	✓	✓	Не применяется	Межресничный контур, контур верхнего века, «декоративная» стрелка	Контур губ	Эффект идеальной четкости. Не забудьте настроить длину иглы в соответствии с типом процедуры.
 1-micro	0,18	✓	✓	✓	Волосковая техника	Межресничный контур	Не применяется	Для сверх тонкой линии. Контролируйте глубину проникновения иглы.
 3-liner	0,3	✓	✓	✓	Общая проработка рисунка без эффекта волосков, техника ретуши	Межресничный контур, контур верхнего и нижнего век	Мягкий и объемный контур губ	Игла для растушевки.
 3-micro	0,18		✓	✓	Не применяется	Межресничный контур, контур верхнего и нижнего век, «декоративная» стрелка	Мягкий контур губ (линия немного шире, чем от 1-liner)	Идеально подходит для контурных работ.
 3-outline	0,25	✓	✓	✓	Шотирование, заполнение и растушевка	Межресничный контур, контур верхнего и нижнего век, «декоративная» стрелка	Четко выраженный контур губ	Идеально подходит для мягких контурных работ. Иглы сведены в плотный пучок.
 3-power	0,3		✓	✓	Интенсивная растушевка	Межресничный контур	Четкий, яркий контур губ	Идеально подходит для коррекции и восстановления цвета. Дает стойкий результат. Ограниченное количество проходов. Контролируйте глубину проникновения иглы.
 3-slope	0,4	✓	✓	✓	Волосковая техника, растушевка	Контур века, межресничный контур, теневая растушевка, «декоративная» стрелка	Эффект идеальной четкости, теневая растушевка	Плоская скошенная игла. Делает тонкую линию за один проход. Требуется специальная подготовка.
 4-flat	0,35	✓	✓	✓	Растушевка	Выраженный контур века, межресничный контур	Выраженный контур губ и растушевка	Отлично подходит для плотного закрашивания.
 5-shader	0,3	✓	✓	✓	Мягкая растушевка, основа бровей	Растушевка, оттенение	Растушевка и заполнение	Отлично подходит для мягкой растушевки и заполнения.

Тип модуля	Диаметр иглы	Symphony II Symphony III	PLM Master	TOP Master Advanced PRO	Брови	Веки	Губы	Особенности работы
 5-magnum	0,3	✓	✓	✓	Мягкая растушевка, основа бровей	Теневая растушевка	Заполнение, эффект полных губ	Подходит также для микропигментирования ареолы и камуфляжа рубцов.
 5-power	0,3		✓	✓	Интенсивная растушевка	Не применяется	Четкая плотная линия, интенсивная растушевка	Создает мягкий, пудровый эффект, идеален для коррекции и восстановления цвета. Стойкий результат. Эффективно работает на коже с рубцовой поверхностью.
 5-round	0,3		✓	✓	Растушевка и заполнение	Не применяется	Растушевка контура губ и заполнение	Подходят только для растушевки и заполнения.
 5-slope	0,4	✓	✓	✓	Тонкие линии, растушевка, заполнение	Не применяется	Растушевка контура губ и заполнение, сплошная ретушь	При правильном использовании все иглы проникают под кожу равномерно.
 5-V-slope	0,4			✓	Обозначение контура брови, растушевка, заполнение	Не применяется	Контур и уголки губ, растушевка	Подходит для разнообразного количества техник.
 7-round	0,3	✓	✓	✓	Мягкая растушевка, заполнение	Не применяется	Скоростное шотирование, растушевка и сплошная ретушь	Плотное заполнение пигментом. Подходит также для микропигментирования ареолы и камуфляжа рубцов.
 7-power	0,3		✓	✓	Растушевка и заполнение	Не применяется	Прорисовка контура губ, растушевка	Ограниченное количество проходов. Эффективно работает на коже с рубцовой поверхностью. Коррекция и восстановление цвета. Стойкий результат.
 9-magnum	0,3	✓	✓	✓	Не применяется	Не применяется	Скоростная растушевка и заполнение	Плотное заполнение пигментом.
 10-ditto	0,4			✓	Не применяется	Не применяется	Цветовые переходы, скоростная растушевка и равномерное заполнение	Растушевка больших поверхностей. Делает работу по затенению более быстрой, также возможна работа под 45-градусным углом для проведения одинарной линии.
 Microlifting Meso 0,5 (plastic)		✓	✓	✓	Лицо и тело: микролифтинг, введение мезо-коктейлей и сывороток. Программы омоложения, стимуляции, тонизации, увлажнения и др..			
 Microneedling Meso 0,7 (metal)			✓		Лицо и тело: микронидлинг, введение мезо-коктейлей и моно-препаратов, стимуляция неокollaгеногенеза. Комплексная терапия: программы AntiAge, лифтинга, выравнивания рельефа кожи, коррекции постакне, шрамов, рубцов, стрий.			